

PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS CON
CÁNCER DE PRÓSTATA EN ETAPA TEMPRANA

Aprenda más sobre
una prueba que puede
ayudarle a informar
su próximo paso en
el tratamiento



Genomic Health®

oncotypeDX®
Genomic Prostate Score

El cáncer de próstata es tan individual como usted

Recibir un diagnóstico de cáncer de próstata puede ser una noticia abrumadora. En esta etapa de su camino, dese tiempo para comprender qué significa este diagnóstico y cuál puede ser el mejor tratamiento para usted.

Para comenzar, es importante comprender que no todos los cánceres de próstata actúan de la misma manera. Algunos son de alto riesgo y con probabilidad de crecer o diseminarse, pero **muchos no son agresivos** y se consideran de bajo riesgo.

Aproximadamente la mitad de las personas recién diagnosticadas de cáncer de próstata pueden tener un riesgo bajo y ser candidatos para una vigilancia activa^{1,2}

Con una clara comprensión de su nivel de riesgo, usted y su médico pueden decidir si un monitoreo a largo plazo con una vigilancia activa es una buena opción o si se necesita un tratamiento inmediato con cirugía o radiación.



Comprender sus opciones

Elegir la vigilancia activa

Según sus factores de riesgo de cáncer de próstata, usted y su médico pueden decidir que la vigilancia activa es la opción adecuada para usted.

Mediante la vigilancia activa, le harán un seguimiento cercano para monitorear el tumor y cualquier cambio en su nivel de riesgo.

Por lo tanto, es posible que nunca necesite una cirugía o radiación, lo que evitará la probabilidad de efectos secundarios como problemas urinarios o intestinales a largo plazo o disfunción eréctil.

La vigilancia activa es un plan de tratamiento para pacientes cuyo tumor probablemente no sea agresivo. Implica chequeos regulares y pruebas constantes, que pueden incluir²:

- Pruebas de antígeno prostático específico (PSA)*
- Exámenes regulares (DRE)[†]
- Repetición de biopsia según la recomendación de su médico

Es importante tener en cuenta que, a pesar de un monitoreo cuidadoso con vigilancia activa, el cáncer de próstata puede eventualmente progresar; sin embargo, es curable en la mayoría de los casos^{3,4}

*Prostate-Specific Antigen (Antígeno específico de la próstata)

[†]Digital Rectal Exams (Exámenes digitales rectales)

Sepa si la vigilancia activa es adecuada para usted

La prueba Oncotype DX Genomic Prostate Score® (GPS [puntaje genómico de la próstata]) ayuda a comprender con mayor claridad si su cáncer es de bajo o alto riesgo

La Red Nacional Integral del Cáncer (National Comprehensive Cancer Network®, o NCCN®, por sus siglas en Inglés) es una autoridad líder en el tratamiento del cáncer y ha creado pautas que se usan para comprender su riesgo clínico. Su riesgo clínico se basa en su puntaje de PSA, su puntaje de Gleason, la etapa de su cáncer y otros factores que su médico puede considerar.

Tim

62 años, bateador estrella, padre, inseguro sobre su primer paso en el tratamiento*

Oncotype DX GPS: 15

**Muerte debido a
cáncer de próstata**
dentro de 10 años

<1 %

Metástasis
dentro de 10 años

1 %

**Patología
adversa**

18 %

15

La prueba Oncotype DX GPS les brinda a usted y su médico más información para sus conversaciones y decisiones de tratamiento

La prueba Oncotype DX GPS se denomina prueba genómica. Mide la actividad (también denominada expresión) de los genes responsables del crecimiento y la supervivencia de las células tumorales.

Esta información permite que la prueba Oncotype DX GPS aclare cómo puede actuar el tumor y si es probable que sea agresivo (patología adversa).

La prueba también predice la probabilidad de morir debido a su cáncer o si se diseminará a otras partes del cuerpo (metástasis) dentro de los 10 años después de la cirugía.

Además de sus factores clínicos, la prueba Oncotype DX GPS le brindará información a usted y su médico para analizar sus próximos pasos.

*Datos de casos de pacientes reales; los nombres de pacientes, imágenes y fotos son ilustrativos.

oncotypeDX®
Genomic Prostate Score

Tener un camino definido por delante

Los resultados de la prueba Oncotype DX® se informan como GPS, lo que puede ayudar a comprender mejor su riesgo individualizado

CUANTO MÁS BAJO ES EL GPS, más bajo es su riesgo. En este caso, el cáncer probablemente no tenga lo que se denomina “patología adversa” y sea agresivo.

También significa que el riesgo de morir debido a su cáncer o que se disemine dentro de 10 años (después de la cirugía) también es bastante bajo. La vigilancia activa puede ser el enfoque preferido.

CUÁNTO MÁS ALTO SEA SU GPS, habrá más probabilidad de que el cáncer sea agresivo y más probabilidad de que su médico le recomiende un tratamiento inmediato.

Una patología adversa significa que el cáncer es agresivo y tiene más probabilidad de crecer y diseminarse



Greg

Oncotype DX
Genomic Prostate
Score®: **40**

Prueba Oncotype DX Genomic Prostate Score®: estudiada en más de 4.000 pacientes⁵⁻¹¹

Además de sus factores clínicos, la prueba Oncotype DX GPS le brindará información a usted y su médico para analizar sus próximos pasos.

Siga estos simples pasos para la prueba Oncotype DX GPS

PRUEBA: la prueba Oncotype DX GPS se realiza en una pequeña muestra de tejido ya obtenida de su biopsia más reciente.

RECEPCIÓN: en aproximadamente 2 semanas, su médico recibirá su **resultado de GPS**, lo que incluye su **nivel de riesgo** de muerte debido al cáncer de próstata y para la metástasis dentro de los 10 años después de la cirugía, así como su riesgo de patología adversa.

Si su resultado sugiere que su tumor probablemente no es agresivo y su riesgo a 10 años es favorable, la vigilancia activa puede ser adecuada para usted.

ANÁLISIS: usted y su médico pueden usar sus resultados para comprender mejor sus opciones y analizar su próximo paso.


El informe con los resultados de GPS brinda datos individualizados sobre su cáncer de próstata, con lo que usted y su médico pueden tener conversaciones más informadas.

Resultado de GPS*

Su categoría de riesgo



Su nivel individualizado de riesgo*

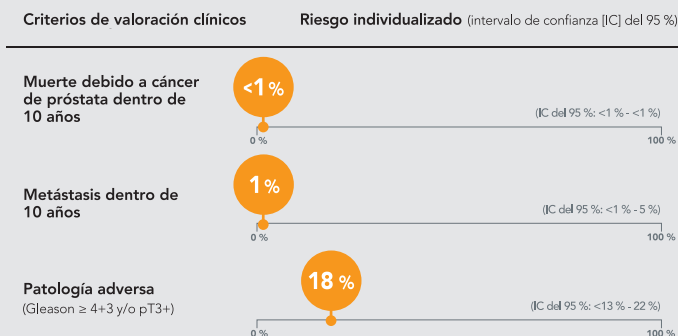

*Traducción en español solo para fines ilustrativos. Los resultados reales sólo están disponibles en inglés.

oncotypeDX®
Genomic Prostate Score

Estar seguro de su decisión de tratamiento

Revisar su informe de la prueba Oncotype DX® GPS

Su médico recibirá un informe que muestra sus resultados y lo que significan. Su médico puede compartir este informe con usted durante sus análisis.

- 1** La prueba Oncotype DX GPS mide la actividad (expresión) de ciertos genes dentro del tumor para calcular el resultado de GPS. En este informe de muestra, el paciente tiene un riesgo individualizado que concuerda con su cáncer de muy bajo riesgo según la NCCN. Probablemente sea un buen candidato para la vigilancia activa.
- 2** En el informe de muestra, el riesgo de muerte debido a cáncer de próstata dentro de los 10 años es $<1\%$, y el riesgo de metástasis dentro de los 10 años después de la cirugía es también $<1\%$.
- 3** El riesgo de enfermedad agresiva (patología adversa) es del 18% . Dado que este riesgo es bajo, la enfermedad probablemente no progrese rápido.

La información, como la que se encuentra en el informe de muestra, ayuda a que usted y su médico tengan conversaciones informadas sobre los próximos pasos.

Pregúntele a su médico qué podrían significar para usted los resultados de la prueba Oncotype DX Genomic Prostate Score®

Informe de GPS de muestra de Tim*†


Informe de la prueba Genomic Prostate Score (GPS)

oncotypeDX®
Genomic Prostate Score

TIM

Fecha de nacimiento: **1 de enero de 1950** Sexo: **Masculino** Número de informe: **OR000123456-01** Fecha del informe: **22 de mayo de 2017**
Médico que solicitó el análisis: **Dr. Inicial del nombre, apellido**

GPS + NCCN®: Riesgo muy bajo

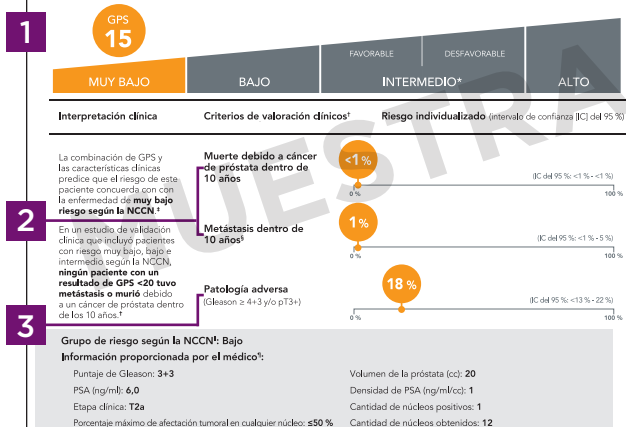

* Las pautas de la NCCN identifican a un subgrupo de pacientes con riesgo favorable/intermedio: grado 3 predominante de Gleason (puntaje de Gleason 3+4=7), porcentaje de núcleos de biopsia positivos <50 % y no más de un factor de riesgo intermedio según la NCCN.
† En el estudio de validación clínica, todos los pacientes recibieron una prostatectomía radical. Las estimaciones de riesgo proporcionadas se basan en el resultado de GPS del paciente y el grupo de riesgo de NCCN.
‡ El grupo de riesgo de GPS + NCCN se define por la probabilidad de patología adversa y/o el riesgo de metástasis dentro de los 10 años y derivó de los estudios de validación clínica que usan criterios de valoración clínicamente relevantes para cada grupo de riesgo. Más detalles en el archivo y disponibles a pedido.
§ En el estudio de validación clínica, la metástasis se determinó mediante estudios por imágenes o biopsia.
¶ Calculado o informado a partir de información clínica proporcionada por el médico.
‡ N/A (no disponible) indica que no se han proporcionado datos a Genomic Health.

GDH-P001 Rev.008

Página 1 de 2

©2004-2017 Genomic Health, Inc. Todos los derechos reservados. Genomic Health, Oncotype DX y Genomic Prostate Score son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Genomic Health, Inc.

*Datos de casos de pacientes reales; los nombres de pacientes, imágenes y fotos son ilustrativos.

†Traducción en español solo para fines ilustrativos. El informe real sólo está disponible en inglés.

Referencias: **1.** Herget et al. *Cancer Med.* 2016. **2.** Referencia con el permiso de las pautas de NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) (Versión 1.2017). © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2017. Todos los derechos reservados. Consultado el 10 de enero de 2017. Para ver la versión más reciente y completa de las pautas, visite en línea www.nccn.org. NATIONAL COMPREHENSIVE CANCER NETWORK®, NCCN®, NCCN GUIDELINES® y todos los otros contenidos de NCCN son marcas comerciales propiedad de National Comprehensive Cancer Network, Inc. **3.** Welty et al. *J Urol.* 2015. **4.** Tosoian et al. *J Clin Oncol.* 2015. **5.** Klein et al. *Eur Urol.* 2014. **6.** Van Den Eeden et al. AUA 2017. Abstract 17-6551. **7.** Cullen et al. *Eur Urol.* 2014. **8.** Knezevic et al. *BMC Genomics.* 2013. **9.** Badani et al. *Urol Pract.* 2015. **10.** Dall'Era et al. *Urol Pract.* 2015. **11.** Datos en archivo. Genomic Health, Inc.

Comprender su cáncer, comprender sus opciones

Pregúntele a su médico por su prueba
Oncotype DX Genomic Prostate Score® para
comprender mejor si la vigilancia activa es
adecuada para usted o si se necesita un
tratamiento inmediato.

Para obtener
información sobre la
prueba Oncotype DX®
Genomic Prostate Score™,
visite **www.uncotypeiq.com**

Para mayor información contacte con
nuestro Centro de Atención Cliente:

Teléfono:

900 878 233

e-mail:

cacdiagnostico@palex.es

VISITE www.genomichealth.com/ www.uncotypeiq.com



Palex Medical SA
DIVISIÓN ONCOLOGÍA

Jesús Serra Santamans, 5
08174 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)
www.palexmedical.com

Para obtener más información sobre la
prueba genómica y la prueba
Oncotype DX® Genomic Prostate Score™, visite
myprostatecancertreatment.org

Genomic Health®

oncotypeDX®
Genomic Prostate Score

Genomic Health, Oncotype DX, Genomic Prostate Score, Oncotype IQ,
Genomic Intelligence Platform y Making cancer care smarter son
marcas comerciales o marcas registradas de Genomic Health, Inc.
© 2018 Genomic Health, Inc. Reservados todos los derechos
GHI40217_0717_ES_ES